



⚠ Den här miniguiden ersätter inte Bruksanvisningen som medföljer din Everyx3. Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna som finns i bruksanvisningen innan du använder din Everyx3 blodsockermätare första gången.

**Everymed AB**  
Göteborgsvägen 99  
S-504 60 Borås, Sweden  
www.everymed.se

**Kundtjänst**  
033-412140  
info@everymed.se

**EVERY X3**

**EVERY X3**  
-Easy as one, two, three!

1

## KNAPPFUNKTIONER

Starta

Stänga av

Bläddra i meny

Bekräfta

Backa i meny   
Kalibrera

## BELYSNING

Aktivera mätarens belysning genom att trycka in **båda** knapparna i 1 sekund.



## KALIBRERING

Ta fram ett magasin ur förpackningen.

Stäng locket på förpackningen.

Tryck tills "ANGE KOD" visas i displayen.

Tryck tills rätt kod visas.

Bekräfta

Displayen visar då statusmenyn med aktuella inställningar, inklusive koden.


Tid och datum visas omväxlande. Jämför med koden på magasinet eller magasinförpackningen.

Mätaren är nu kalibrerad.

Stäng av mätaren.


2

## LADDA LANCETTEN

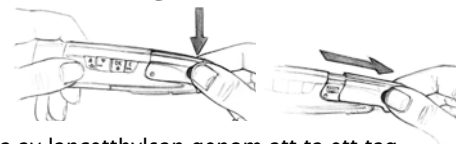

Ta av lancetthylsan genom att ta ett tag **längst fram** på hylsan.

För in en lancettnål botten av hållaren.

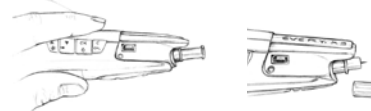

Håll kvar i nålen och ta av skyddshatten.

Sätt tillbaka lancetthylsan.


## STÄLLA IN STICKDJUP

Läge 1 = minsta stickdjup

Läge 5 = största stickdjup.

Läge 3-4 är lämpligt för de flesta, men prova dig fram.

## LADDA ETT MAGASIN

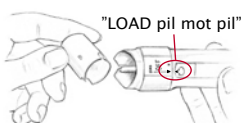


"LOAD pil mot pil"

Vrid till "LOAD" så att magasinhylsan går att lossa.

Ta av magasinhylsan så att axeln blir synlig.

Skjut in magasinet på mätarens axel med magasinets röda pil och teststicka nr "1" mot "LOAD".

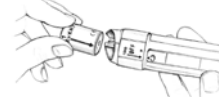

Sätt tillbaks hylsan och var säker på att hylsan går ända ner i taket på magasinet.

Håll den där och vrid till "OFF".



När magasinet tagits ur förpackningen håller det sig i en vecka. Byt till nytt magasin efter sju dagar även om det inte är helt förbrukat.

3

## BLODSOCKERMÄTNING

Vrid från "OFF" till "ON" med ett distinkt grepp

Teststickan matas fram och en bloddroppe visas i displayen.

Spänn upp lancetten, placera mot teststället och tryck på avfyringsknappen. Ta fram en liten bloddroppe.

Ta ordentligt stöd med fingret och låt blodroppen sugas in i stickan tills ett (pip hörs) och timglas visas i displayen och mätningen börjar. Efter ca 10s presenteras ditt blodsockervärde.

Stäng av mätaren genom att vrida tillbaka till "OFF". Den använda stickan dras tillbaka in i magasinet och mätaren är redo för nästa mätning.

OBS! Dra aldrig ut teststickan ur mätaren!!

För mer detaljerad info se vidare i Bruksanvisningen som följer med Everyx3.